



Stoma-
versorgung

FREIHEIT AKTIV ERLEBEN

STOMAVERSORGUNG FREIHEIT AKTIV ERLEBEN



Die „Diagnose“ Stoma ist ein Schicksalsschlag, der mit einer großen Veränderung der Lebenssituation einhergeht: Tägliche Abläufe und aktuelle Gewohnheiten ändern sich und müssen noch mal neu überdacht werden.

Trotzdem bedeutet diese Diagnose nicht, dass man sein selbstbestimmtes Leben aufgeben muss. Ganz im Gegenteil!

Um Sie in Ihrem täglichen Umgang mit einem Stoma zu unterstützen, ist eine sichere, komfortable und auch diskrete Versorgung ein wichtiges Schlüsselement.

B. Braun bietet Ihnen dabei Produkte an, die sich an Ihren Anforderungen und Bedürfnissen orientieren. Sie sollen aktiv dazu beitragen, Ihnen die Lebensqualität zurückzugeben, die Sie sich wünschen.

Unsere praxisorientierte Entwicklungsarbeit und strengen Maßstäbe im Qualitätsstandard sowie die enge Zusammenarbeit mit Stomatherapeuten und Stomaträgern sind die Grundlage unseres modernen, auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Sortiments.

Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei Fragen rund um das Thema Stoma und bieten gerne Hilfestellungen an.



EINTEILIGE
VERSORGUNG
Seite 8



Be 1°
Seite 20



ZWEITEILIGE
VERSORGUNG
Seite 24



IRRIGATION
Seite 38



HAUTSCHUTZ
Seite 48



ZUBEHÖR
Seite 52

Sie suchen Produkte speziell für Kinder und Jugendliche? Auf der Seite 13 finden Sie Informationen zum Thema Pädiatrie und Produkte, die B. Braun dazu anbietet.

INHALT

EINTEILIGE VERSORGUNG

Softima® Active Kolostomie Beutel	11
Softima® Active Ileostomie Beutel	12
Softima® Kolo	14
Softima® Kolo konvex	15
Softima® Ileo Roll'Up	16
Softima® Ileo Roll'Up konvex	17
Softima® Uro Silk	18
Softima® Uro Silk konvex	19

ZWEITEILIGE VERSORGUNG

Softima® 3S Be 1® Basisplatte plan	22
Be 1® Kappe	23
Softima® 3S Basisplatte plan	26
Softima® 3S Basisplatte konvex	27
Softima® 3S Kolostomiebeutel	28
Softima® 3S Roll'Up Ileostomiebeutel	29
Softima® 3S Uro	30
Softima® 3S High Flow	31
Softima® Key Basis plan	32
Softima® Key Basis konvex	33
Softima® Key Kolo	34
Softima® Key Ileo Roll'Up	35
Softima® Key Ileo Drainage	36

IRRIGATION

IryPump® S Set	40
IryPump® Wasserbehälter	40
IryPump® Power Supply	41
IryCone+	41
IryPump® Tragetasche	42
Iryflex® Set	42
Iryflex® Wasserbehälter	43
Iryflex® Sicherheitskonus	43
Iryflex® Basisplatte	44
IrySleeve® Irrigationsschlauchbeutel	44
Iryfix® Stomaverschlusskappe	45
Softima® Active Mini	46
Softima® Kolo Mini	47

HAUTSCHUTZ


Askina® Barrier Film	49
Askina® Barrier Swabs	49
Askina® Barrier Cream	50
Askina® Vliesstoffkompressen	50
B. Braun Adhesive Remover (Pflasterentferner)	51
Superfiller	51

ZUBEHÖR

Ileo® Gel+	53
B. Braun Stoma-Gürtel	54
Biotrol® Entlüftungsfilter	54
Extrufix® Entsorgungsbeutel	55
Stoma Entsorgungsbeutel	55
Verschlussklammer	56
Medicare® Bettbeutel	56
Urimed® Tribag	57
Flow Collector	57

HP-Filter

FOKUS AUF HIGH PERFORMANCE

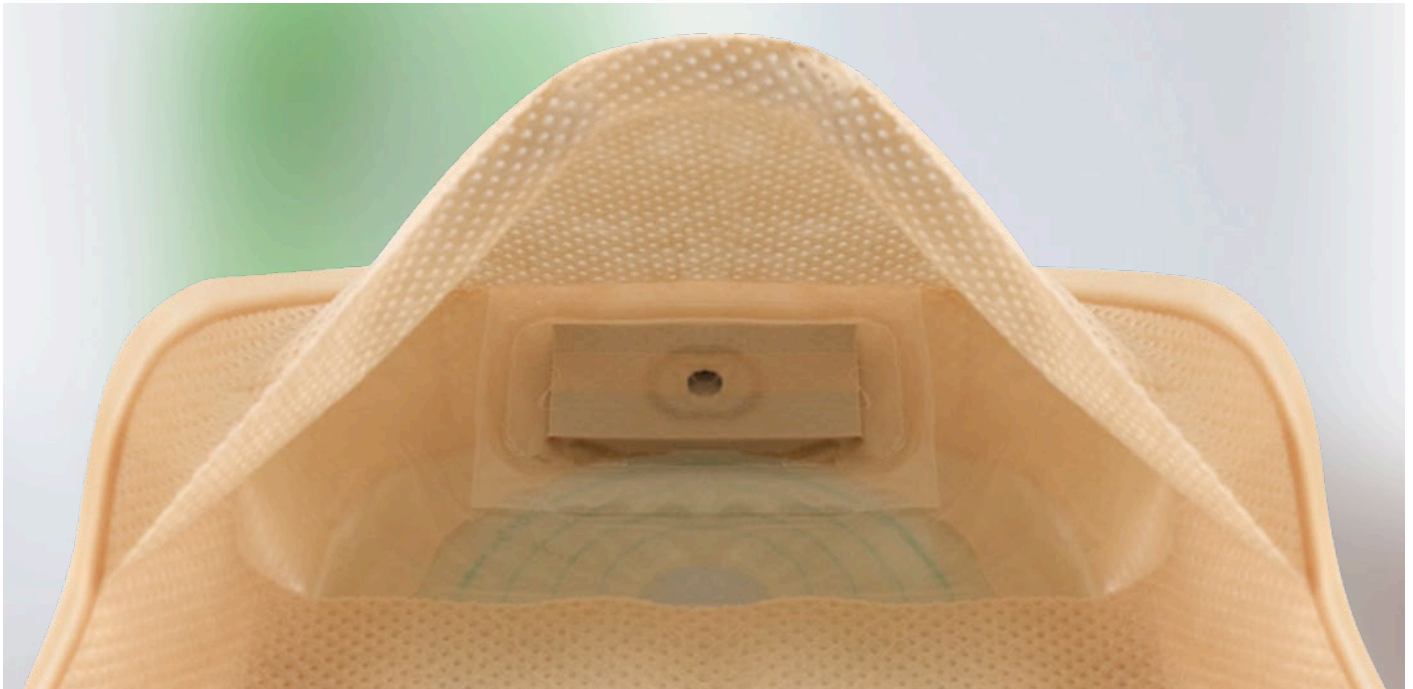

WELCHE FILTERLEISTUNG FÜR WELCHEN PATIENTEN?

KOLOSTOMIE

Trockener Stuhl	
Kleine Partikel	
Gasentstehung	●●●
Geruch	●○○

ILEOSTOMIE

Feuchte & flüssige Stuhlableitung	
Große Partikel	
Gas	●○○
Geruch	●●○

UROSTOMIE

Urin	
Flüssig	
Kein Gas	○○○
Geruch	○○○

- Bedarf an hoher Gasfilterleistung

- Bedarf an Wasserbeständigkeit

- Kein Bedarf an einem Filter

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN EINEN FILTER MIT HOHER ENTLÜFTUNGSKRAFT

- Schutz vor Flüssigkeiten (Wasser- & Öl-beständig)
- Gasdurchlässig
- Atmungsaktive High Tech-Membran

**HIGH PERFORMANCE FILTER
B. BRAUN**

- Hohes Entgasungspotenzial
- Sehr gute Geruchsneutralisierung
- Dichtigkeit gegenüber Flüssigkeiten
- Geringeres Risiko des Auftretens eines Ballon-Effektes
- Erhöhtes Vertrauen aufgrund des geschützten Filters
- Optimale Diskretion und erhöhter Komfort



PRODUKTPORTFOLIO

KOLOSTOMIE

ILEOSTOMIE

KOLOSTOMIE

ILEOSTOMIE

EINTEILIGE SYSTEME – Softima® Active

Softima® Active Closed



PLAN

Softima® Active Roll'Up



PLAN

ZWEITEILIGE KLICK-SYSTEME – Softima® 3S

Softima® 3S Closed



KONVEX

Softima® 3S Roll'Up



KONVEX

EINTEILIGE SYSTEME – Softima®

Softima® Roll'Up



PLAN



KONVEX

ZWEITEILIGE KLEBE-SYSTEME – Softima® Key

Softima® Key Roll'Up



KONVEX




EINTEILIGE VERSORGUNG

Einteilige Versorgungen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort. Mit dem Softima® Active hat B. Braun ein System, welches sich durch eine moderne und flexible Haftfläche auszeichnet. Anders als alle bisherigen Systeme hält die Haftfläche sofort und muss nicht extra angewärmt werden.

Softima® Active

ULTRA-FLEXIBLE, EINTEILIGE STOMA-VERSORGUNG

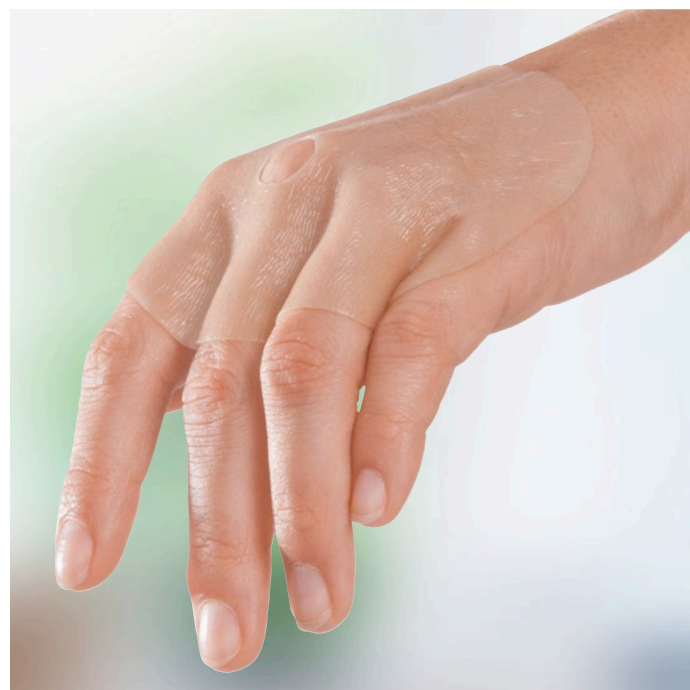

Softima® Active wurde für Stomaträger entwickelt, die Wert auf eine unauffällige, hautschonende Versorgung legen und keine Kompromisse in puncto Bewegungsfreiheit eingehen wollen.

Dank der hohen Flexibilität passt sich Softima® Active jeglicher Hautunebenheit an und folgt jeder Bewegung:

- ✓ Sofortige, sichere Haftung
- ✓ Perfekter, sicherer Sitz
- ✓ Rückstandslose Entfernung
- ✓ Ausgezeichneter Hautschutz

ULTRA-FLEXIBLER HAUTSCHUTZ

Dank der neuen SkinTech® Formel ist die Basisplatte im Vergleich zu anderen Systemen um ein Vielfaches flexibler.

Das erleichtert vor allem die Versorgung bei Hautunebenheiten oder Hernien, da sich die Basisplatte wie eine zweite Haut anschmiegt.

Die Vorteile für den Stomaträger liegen auf der Hand: wesentlich höherer Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

BESTE WASSERRESISTENZ

Die patentierte Zusammensetzung der Basisplatte (100% SIS) macht's möglich: Softima® Active hinterlässt keinerlei Rückstände auf der Haut. Auch bei sehr flüssigen Ausscheidungen bleibt die Basisplatte formstabil.

EFFEKTIVE FILTERLEISTUNG

- Hohe Luftdurchlässigkeit – kein Aufblähen
- Bessere Filterleistung – Gerüche werden zuverlässig neutralisiert

Softima® Split Cover

DER BEUTEL FÜR MEHR KONTROLLE



- Einfacheres Anbringen des Beutels
- Visuelle Kontrolle des Stomas zu jeder Zeit

- Kontrolle der Ausscheidung (Konsistenz und Farbe)
- Kontrolle der Ausscheidungsmenge



Das Split Cover (auf Deutsch „Inspektionsfenster“) überzeugt gleich doppelt: Zum einen ist der beigefarbene Beutel äußerst diskret. Zum anderen können das Stoma und der Stuhl jederzeit kontrolliert werden – sowohl in der post-OP-Phase, als auch im täglichen Leben. Einfach praktisch!

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

- Mehr Selbstbestimmung, wenn es um die Kontrolle des Stomas und Stuhls geht (z.B. Farbe/Konsistenz, Menge)
- Kein Versorgungswechsel für die Kontrolle notwendig

EINTEILIGE VERSORGUNG



Softima® Active Kolostomie Beutel













Enterostomabeutel der neuesten Generation mit einem einzigartigen, flexiblen und sicheren Hautschutz, die patentierte SkinTech® Haftfläche passt sich jeder Form an

- Patientierter, einzigartiger SkinTech® Hautschutz
- Ultraflexibel
- Keine Haftrückstände
- Sicherer, sofortiger Halt auf der Haut, ohne vorheriges Anwärmen
- Formstabil, auch bei flüssigen Ausscheidungen
- Neue Filtertechnologie mit besserer Entlüftung des Beutels und extra starker Geruchsfiltration
- Neue ergonomische Beutelform mit hoch sitzender Basisplatte, wodurch der Beutel auch bei Füllung flach anliegt
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Beige Varianten mit Sichtfenster erhältlich 

Die Basisplatte darf beim Auflegen auf die Haut NICHT auseinandergezogen werden. Der Ausschnitt sollte genau der Stomagröße entsprechen.

3 Beutelgrößen: Mini: 220 ml Volumen; Midi: 460 ml Volumen; Maxi: 600 ml Volumen

FARBE	GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● beige 	Mini	~220 ml	 15–45 mm	29.26.01.2125	30 Stück	4612215DE	12499111
○ transparent	Midi	~460 ml	 15–50 mm	29.26.01.2125	30 Stück	4611115DE	09061606
● beige 	Midi	~460 ml	 15–50 mm	29.26.01.2125	30 Stück	4612115DE	12499128
● beige 	Midi	~460 ml	25 mm	29.26.01.2125	30 Stück	4610125DE	09061670
● beige 	Midi	~460 ml	30 mm	29.26.01.2125	30 Stück	4610130DE	09061687
● beige 	Midi	~460 ml	35 mm	29.26.01.2125	30 Stück	4610135DE	09061693
● beige 	Midi	~460 ml	40 mm	29.26.01.2125	30 Stück	4610140DE	09061701
○ transparent	Maxi	~600 ml	 15–65 mm	29.26.01.2125	30 Stück	4611380DE	09717099
● beige 	Maxi	~600 ml	 15–65 mm	29.26.01.2125	30 Stück	4612380DE	12499134

EINTEILIGE VERSORGUNG



Softima® Active Ileostomie Beutel


























Enterostomabeutel der neuesten Generation mit einem einzigartigen, flexiblen und sicheren Hautschutz, die patentierte SkinTech® Haftfläche passt sich jeder Form an

- Patientierter, einzigartiger SkinTech® Hautschutz
- Ultraflexibel
- Keine Haftrückstände
- Sicherer, sofortiger Halt auf der Haut, ohne vorheriges Anwärmen
- Formstabil, auch bei flüssigen Ausscheidungen
- Neue Filtertechnologie mit besserer Entlüftung des Beutels und extra starker Geruchsfiltration
- Neue ergonomische Beutelform mit hoch sitzender Basisplatte, wodurch der Beutel auch bei Füllung flach anliegt
- Großer Auslass: 7 cm
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Ausgewählte Beige Varianten auch mit Sichtfenster erhältlich 

Die Basisplatte darf beim Auflegen auf die Haut NICHT auseinandergezogen werden. Der Ausschnitt sollte genau der Stomagröße entsprechen.

3 Beutelgrößen: Mini: 220 ml Volumen; Midi: 460 ml Volumen; Maxi: 600 ml Volumen

FARBE	GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
 transparent	Mini	~220 ml	 15–45 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4621215DE	09061983
 beige	Mini	~220 ml	 15–45 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4620215DE	09061977
 beige 	Mini	~260 ml	 15–45 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4622215DE	14172851
 transparent	Midi	~460 ml	 15–50 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4621115DE	09061902
 beige	Midi	~460 ml	 15–50 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4620115DE	09061859
 beige 	Midi	~580 ml	 15–50 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4622115DE	12499140
 beige	Midi	~460 ml	25 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4620125DE	09061865
 beige	Midi	~460 ml	30 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4620130DE	09061871
 beige	Midi	~460 ml	35 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4620135DE	09061888
 beige	Midi	~460 ml	40 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4620140DE	09061894
 transparent	Maxi	~600 ml	 15–65 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4621380DE	09717113
 beige	Maxi	~600 ml	 15–65 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4620380DE	09717107
 beige 	Maxi	~710 ml	 15–65 mm	29.26.02.2129	30 Stück	4622380DE	12499157

Pädiatrie

EINE STOMAVERSORGUNG, DIE ALLES MITMACHT



Die kleinsten Beutel der Softima® Active Produktreihe sind mit einem **Volumen von 220 ml** bestens zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen geeignet.

IHRE VORTEILE

- Hypoallergen
- Sofortige Haftung dank hydrokolloidem SkinTech® Hautschutz
- Kinder müssen nicht still liegen
- Repositionierbar
- Wasserfest
- Die hohe Flexibilität des SkinTech® Hautschutzes erlaubt den Kindern maximale Bewegungsfreiheit und ist kaum spürbar



Softima® Active
Kolostomie Beutel Mini

Seite 11



Softima® Active
Ileostomie Beutel Mini

Seite 12

EINTEILIGE VERSORGUNG



Softima® Kolo

Ergonomisch geformter, geschlossener Beutel mit komplettem Hautschutz im Flower Shape-Design

- Ergonomische Form
- Kompletter Hautschutz im Flower Shape-Design
- Weiche Vliesumhüllung
- Integrierter Laminar Technologie Filter:
 - Hohe Entgasungsleistung
 - Starke Geruchsfiltrierung
- Inkl. Klebeetiketten zum Abkleben des Filters
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

2 Beutelgrößen: Mini: 220 ml Volumen; Midi: 460 ml Volumen

FARBE	GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● beige	Mini	~220 ml	🌐 15–45 mm	29.26.04.1073	30 Stück	43212DE	00716773
● beige	Mini	~220 ml	20 mm	29.26.04.1073	30 Stück	43220DE	00716968
● beige	Mini	~220 ml	25 mm	29.26.04.1073	30 Stück	43225DE	00716974
● beige	Mini	~220 ml	30 mm	29.26.04.1073	30 Stück	43230DE	00716980
● beige	Mini	~220 ml	35 mm	29.26.04.1073	30 Stück	43235DE	00717040
○ transparent	Midi	~460 ml	🌐 16–50 mm	29.26.01.2102	30 Stück	43616	04128398
● beige	Midi	~460 ml	🌐 16–50 mm	29.26.01.2102	30 Stück	43016	04128381
● beige	Midi	~460 ml	24 mm	29.26.01.2102	30 Stück	43024	04128317
● beige	Midi	~460 ml	28 mm	29.26.01.2102	30 Stück	43028	04128323
● beige	Midi	~460 ml	32 mm	29.26.01.2102	30 Stück	43032	04128346
● beige	Midi	~460 ml	36 mm	29.26.01.2102	30 Stück	43036	04128352
● beige	Midi	~460 ml	40 mm	29.26.01.2102	30 Stück	43040	04128369
● beige	Midi	~460 ml	45 mm	29.26.01.2102	30 Stück	43045	04128375



Softima® Kolo konvex

Ergonomisch geformter, geschlossener Beutel mit konvexer Hautschutzfläche im Flower Shape-Design

- Konvexes Profil des Hautschutzes gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung und reduziert damit das Risiko von Druckulcera und -nekrosen
- Zur komfortablen und sicheren Versorgung von Kolostomieanlagen auf oder unter Hautniveau
- Konvexität = 4 mm
- Optimale Anpassung an die Haut, weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Drei Möglichkeiten der Gürtelfixierung
- Weiche Vliesumhüllung
- Integrierter Laminar Technologie Filter:
 - Hohe Entgasungsleistung
 - Starke Geruchsfiltrierung
- Inkl. Klebeetiketten zum Abkleben des Filters
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Beutelgröße: 460 ml

FARBE	GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	Midi	~460 ml	🌐 15–35 mm	29.26.01.3014	10 Stück	43117	03012127
○ transparent	Midi	~460 ml	🌐 15–45 mm	29.26.01.3014	10 Stück	43118	03012133
● beige	Midi	~460 ml	🌐 15–35 mm	29.26.01.3014	10 Stück	43017	03010619
● beige	Midi	~460 ml	🌐 15–45 mm	29.26.01.3014	10 Stück	43018	03011978
● beige	Midi	~460 ml	30 mm	29.26.01.3014	10 Stück	43031	03011990
● beige	Midi	~460 ml	35 mm	29.26.01.3014	10 Stück	43037	03012104

EINTEILIGE VERSORGUNG





Softima® Ileo Roll'Up

Ergonomisch geformter, einteiliger Ausstreifbeutel mit Roll'Up Auslass, komplettem Hautschutz im Flower Shape-Design

- Zur komfortablen und sicheren Versorgung von Ileostomieanlagen
- Einfacher Roll'Up Verschluss
- Einfache Entleerung dank der weißen Öffnungslaschen
- Großer Auslass: 7 cm
- Optimale Anpassung an die Haut, weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Weiche Vliesumhüllung
- Integrierter LKP-Filter (stuhlundurchlässig)
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Beutelgröße: 580 ml

FARBE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	~580 ml	 15–60 mm	29.26.02.2125	30 Stück	41815	00199964
● beige	~580 ml	 15–60 mm	29.26.02.2125	30 Stück	41715	00170498
● beige	~580 ml	25 mm	29.26.02.2125	30 Stück	41725	00200101
● beige	~580 ml	30 mm	29.26.02.2125	30 Stück	41730	00200118
● beige	~580 ml	35 mm	29.26.02.2125	30 Stück	41735	00200124
● beige	~580 ml	40 mm	29.26.02.2125	30 Stück	41740	00200182







Softima® Ileo Roll'Up konvex

Ergonomisch geformter Ausstreifbeutel mit konvexer Hautschutzfläche im Flower Shape-Design

- Zur komfortablen und sicheren Versorgung von Ileostomieanlagen auf oder unter Hautniveau
- Konvexität = 4 mm
- Einfacher Roll'Up Verschluss
- Einfache Entleerung dank der weißen Öffnungslaschen
- Großer Auslass: 7 cm
- Optimale Anpassung an die Haut, weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Schonende Druckverteilung, drei Möglichkeiten der Gürtelfixierung unter der Hautschutzfläche
- Weiche Vliesumhüllung
- Integrierter LKP-Entlüftungsfilter
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Beutelgröße: 580 ml

FARBE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	~580 ml	 15–35 mm	29.26.02.3017	10 Stück	41817	03013368
○ transparent	~580 ml	 15–45 mm	29.26.02.3017	10 Stück	41818	03013894
● beige	~580 ml	 15–35 mm	29.26.02.3017	10 Stück	41717	03012156
● beige	~580 ml	 15–45 mm	29.26.02.3017	10 Stück	41718	03012162
● beige	~580 ml	25 mm	29.26.02.3017	10 Stück	41726	03012564
● beige	~580 ml	30 mm	29.26.02.3017	10 Stück	41731	03012570

EINTEILIGE VERSORGUNG





Softima® Uro Silk

Einteiliger Urostomiebeutel mit komplettem Hautschutz im Flower Shape-Design

- Komplette hydrokolloide Basisplatte zur optimalen Anpassung an die Haut, weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Easy Outlet-Auslasssystem zur einfachen Entleerung
- Inklusive Universaladapter zum Anschluss von Nacht- oder Beinbeuteln, die Adapter liegen in gleicher Anzahl wie die Beutel bei
- Idealerweise mit Medicare® Bettbeutel oder Urimed® Tribag Plus
- Rückflusssperre
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Beutelgröße: 620 ml

FARBE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	~620 ml	 12-60 mm	29.26.03.2036	20 Stück	43913	00607179
● beige	~620 ml	 12-60 mm	29.26.03.2036	20 Stück	43914	00607185



Softima® Uro Silk konvex

Ergonomisch geformter Urostomiebeutel mit konvexer, urinresistenter Hautschutzfläche im Flower Shape-Design

- Komplette hydrokolloide Basisplatte zur optimalen Anpassung an die Haut, weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Easy Outlet-Auslasssystem zur einfachen Entleerung
- Inklusive Universaladapter zum Anschluss von Nacht- oder Beinbeuteln, die Adapter liegen in gleicher Anzahl wie die Beutel bei
- Idealerweise mit Medicare® Bettbeutel oder Urimed® Tribag Plus
- Rückflusssperre
- Sanfter Neigungswinkel des konvexen Hautschutzes sorgt für eine optimale Druckverteilung und reduziert damit das Risiko von Druckulcera und -nekrosen
- Konvexität = 4 mm
- Seidig-weiche Vliesumhüllung
- Dreifach-Gürtelfixierung unterhalb der Hautschutzfläche
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Beutelgröße: 620 ml

FARBE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	~620 ml	🌐 15–25 mm	29.26.03.3010	10 Stück	43915	02924955
○ transparent	~620 ml	🌐 15–35 mm	29.26.03.3010	10 Stück	43917	02946023
○ transparent	~620 ml	25 mm	29.26.03.3010	10 Stück	43920	02946247
○ transparent	~620 ml	30 mm	29.26.03.3010	10 Stück	43922	02946253
● beige	~620 ml	🌐 15–35 mm	29.26.03.3010	10 Stück	43919	02927095




Be 1® – EINE KOMPAKTE LÖSUNG

Erhalten Sie Ihre Kontrolle zurück – dank der Stoma-Kappe mit integriertem geschlossenen Stomabeutel für Kolostomie-Träger:

- Innovative Stomaversorgung
- Mehr Kontrolle bei der Stuhlentleerung
- Mehr Kontrolle bei der Darmgasabgabe
- Für ein verbessertes Körperbild

Be 1[®]

DIE INNOVATION!

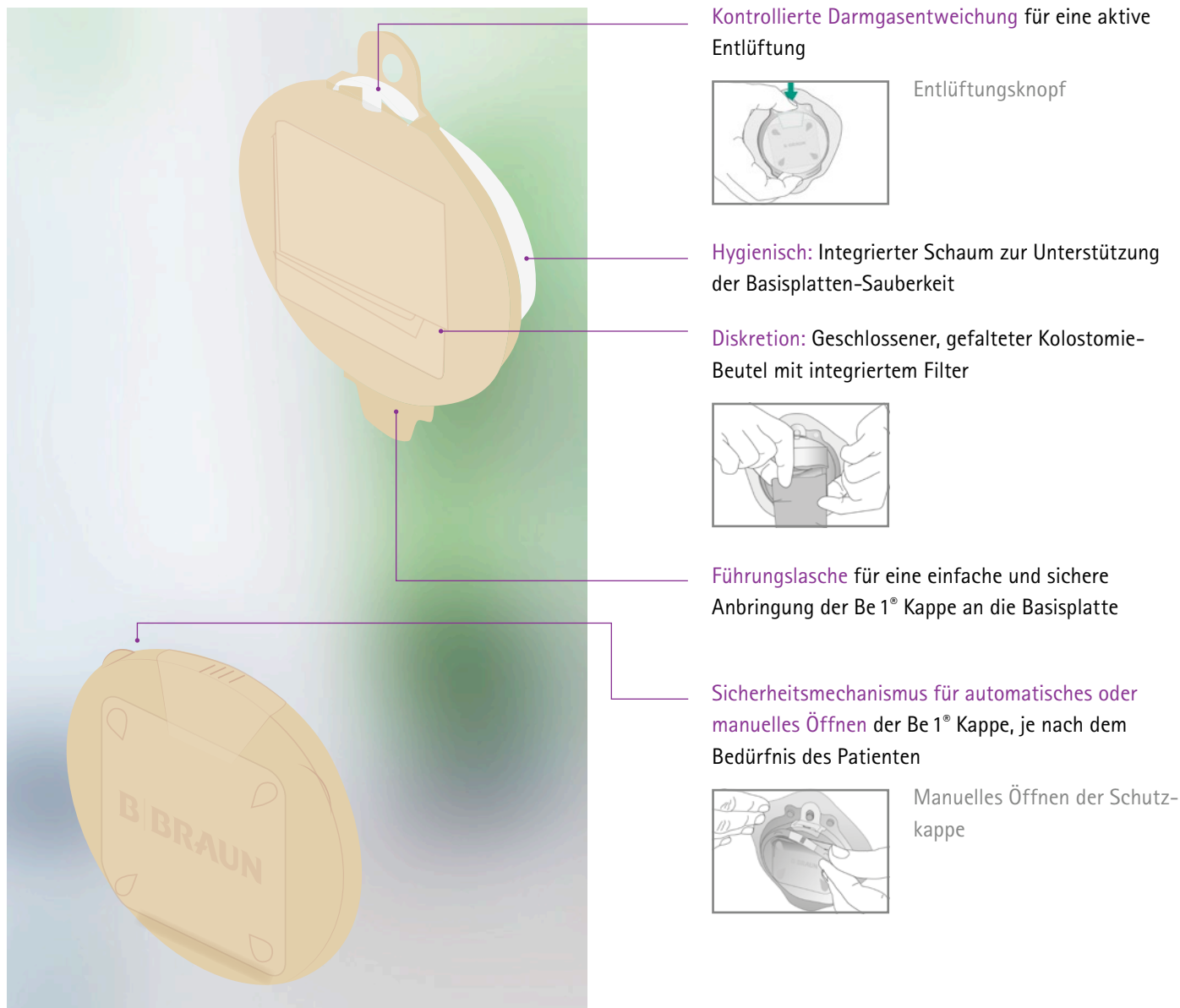

Be 1[®] ist ein neues Konzept für die Kolostomie-Versorgung:
Eine Kappe, die Sicherheit und Kontrolle bietet!

Die Be 1[®] Kappe besteht aus:

- Einem gefalteten, geschlossenen Kolostomie-Beutel mit integriertem Filter
- Einer Führungsrille mit einem Sicherheitsknopf
- Einer Schutzkappe
- Einem Entlüftungsknopf





Be 1[®]



Softima[®] 3S Be 1[®] Basisplatte plan

Die Softima[®] 3S Be 1[®]-Basisplatten sind mit der zweiteiligen Be 1[®] Kappe für Kolostomie-Träger zu verwenden.

- Vollumfänglicher Hautschutz der Basisplatte
- Flexibler Kupplungsring mit Führungssystem
- Erhältlich in den Rastring-Größen 55 und 65 mm entsprechend den Rastring-Größen der Be 1[®] Kappe
- Durchmesser 55 mm: ausschneidbar 15-40 mm
- Durchmesser 65 mm: ausschneidbar 15-50 mm
- Packung mit 5 oder 10 Basisplatten

RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
55 mm	 15-40 mm	29.26.05.1099	10 Stück	936516DE	15198485
55 mm	 15-40 mm	29.26.05.1099	5 Stück	936517DE	15198516
65 mm	 15-50 mm	29.26.05.1099	10 Stück	936616DE	15198491
65 mm	 15-50 mm	29.26.05.1099	5 Stück	936617DE	15198539



Be 1° Stoma-Kappe

Die Stoma-Kappe mit integriertem geschlossenem Stomabeutel für Kolostomie-Träger

- Erhältlich in den Rastring-Größen 55 mm und 65 mm
- Be 1° Produktfarbe und integrierter gefalteter Beutel: beige
- Größe der geschlossenen Be 1° Kappe mit Schutzkappe (L x B):
93 mm x 70 mm (bei Rastring: 55 mm); 103 mm x 81 mm (bei Rastring: 65 mm)
- Entlüftungstaste an der Oberseite des Gerätes zur aktiven Entlüftung von Darmgasen
- Kolostomie-Beutel mit integriertem Filter
- Beutelkapazität des ungefalteten Beutels (+/- 30 ml; ISO 8670-2):
615 ml (bei Durchmesser 55 mm); 635 ml (bei Durchmesser 65 mm)
- Integrierter Schaumstoffring am Produkt zur Geräuschreduzierung und Hygiene
- Die Schutzkappe wird bei dringender Stuhlentleerung automatisch geöffnet, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten
- Packung mit 30 Stück

RINGGRÖSSE	VOLUMEN	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
55 mm	~615 ml	29.26.01.0083	30 Stück	9350355DE	15198462
65 mm	~635 ml	29.26.01.0083	30 Stück	9350365DE	15198479

Be 1° ist ebenfalls kompatibel mit den Softima® 3S Basisplatten plan s. S. 26



ZWEITEILIGE VERSORGUNG

Zweiteilige Systeme ermöglichen dem Stomaträger einen schnellen Beutelwechsel, ohne die Basisplatte tauschen zu müssen. Die Basisplatte kann in der Regel 2–4 Tage auf der Haut verbleiben. Mit dem neuen Softima® 3S bietet B. Braun ein System, welches sich durch seine Flexibilität, Einfachheit und Sicherheit auszeichnet.

Softima® 3S & Softima® Key

ZWEITEILIGE, FLEXIBLE VERSORGUNG FÜR EINEN HOHEN TRAGEKOMFORT



Softima® 3S – SIMPEL. SICHER. SOFT.

Flexibles zweiteiliges Stomasystem mit Sicherheits„klick“

Softima® 3S ist die neueste Generation der 2-teiligen Rastring-Systeme. Es vereint die Sicherheit des Rastring mit dem Komfort der Haftsyste.

SIMPEL.


Das „Guiding System“ ermöglicht ein einfaches Positionieren des Beutels auf der Basisplatte. Dank des untergreifbaren Rastring erfolgt das Einrasten des Beutels ganz leicht und ohne Druck auf den Bauch.

SICHER.

Der zusätzliche Sicherheitsverschluss gibt dem Beutel mehr Halt und vermittelt dem Träger ein größeres Sicherheitsgefühl. Die 3 möglichen Gürtelpositionen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Situation des Betroffenen.

SOFT.

Der neue Rastring ist flexibel auch wenn der Beutel aufgesetzt ist. Die neue Folie passt sich perfekt der Körperkontur an, dadurch wird eine hohe Diskretion erreicht.

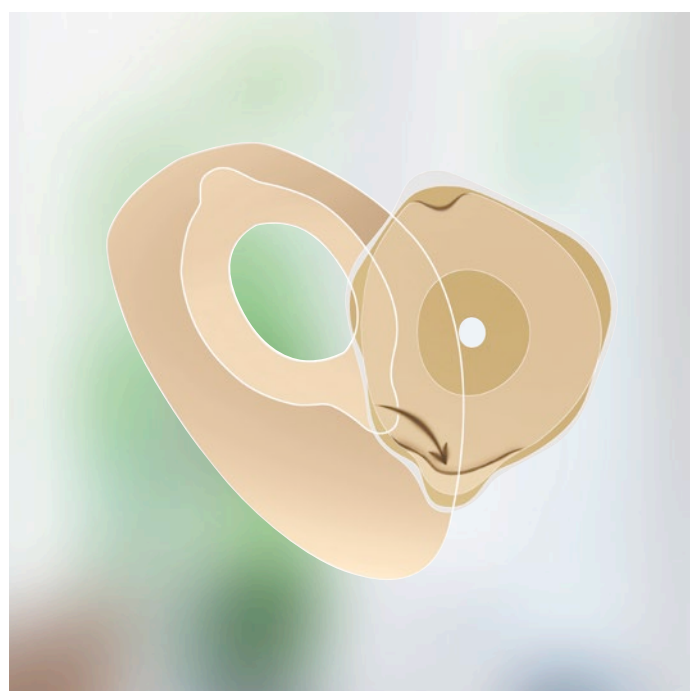

Softima® Key – VERDAMMT NAH AM EINTEILER

Flexibles zweiteiliges Stomasystem mit Führungshilfe im Schlüssel-Schloss-Prinzip

Dank der Hafring-Kupplung bietet der Softima® Key eine Flexibilität fast wie ein einteiliges System. Der Beutel kann ohne Druck auf der Basisplatte fixiert werden.

EINFACHE UND GENAUE POSITIONIERUNG DURCH INTEGRIERTE FÜHRUNGSHILFE

Die Softima® Key Basisplatte verfügt über eine weiche, flexible Haftzone zum Aufbringen der Versorgungsbeutel, die im unteren Bereich mit einer Halterung zum Einlegen der Beutel ausgestattet ist.

OPTIMALER UND SICHERER SITZ DES BEUTELS AUF DER BASISPLATTE

Die Softima® Key Versorgungsbeutel sind mit einer formstabilen Adhäsivfläche aus leistungsstarken Haftkomponenten ausgestattet, die für einen sicheren Sitz des Beutels auf der Platte sorgen und Undichtigkeiten verhindern.





ZWEITEILIGE VERSORGUNG




Softima® 3S Basisplatte plan

Extra flexible Basisplatte für das 2-teilige Rastring-System Softima® 3S
„Simpel. Sicher. Soft.“ – es vereint die Sicherheit des Rastring mit dem Komfort der Haftsysteme

- Besonders weiche Basisplatten-Rastring-Kombination
- Einfaches Positionieren dank Guiding System
- Minimierter Druck auf den Bauch
- Extra Verriegelung für mehr Sicherheit
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
45 mm	 15–30 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936415DE	04821550
45 mm	20 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936420DE	04821567
45 mm	25 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936425DE	04821573
45 mm	30 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936430DE	04821596
55 mm	 15–40 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936515DE	04821604
55 mm	35 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936535DE	04821610
55 mm	40 mm	29.26.05.0141	5 Stück	936540DE	04822271
65 mm	 15–50 mm	29.26.05.0142	5 Stück	936615DE	04822354
65 mm	45 mm	29.26.05.0142	5 Stück	936645DE	04822360
80 mm	 15–65 mm	29.26.05.0142	5 Stück	936815DE	04823141

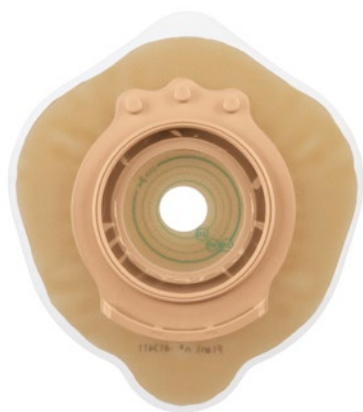

Softima® 3S Basisplatte konvex

Extra flexible Basisplatte für das 2-teilige Rastring-System Softima® 3S
 „Simpel. Sicher. Soft.“ – es vereint die Sicherheit des Rastring mit dem Komfort der Haftsysteme

- Besonders weiche Basisplatten-Rastring-Kombination
- Einfaches Positionieren dank Guiding System
- Minimierter Druck auf den Bauch
- Extra Verriegelung für mehr Sicherheit
- Angenehmes Tragegefühl durch 6 mm Konvexität
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
45 mm	🌀 15–26 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937415DE	04823448
45 mm	25 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937425DE	04823684
55 mm	🌀 15–36 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937515DE	04824519
55 mm	30 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937530DE	04824525
65 mm	🌀 15–46 mm	29.26.06.0074	5 Stück	937615DE	04824583

ZWEITEILIGE VERSORGUNG



Softima® 3S Kolostomiebeutel

Moderner Kolostomiebeutel für das flexible, 2-teilige Rastring-System

Softima® 3S „Simpel. Sicher. Soft.“

- Blickdichtes, weiches Vlies
- Raschelarme Folie
- Filter mit hohem Luftdurchlass und effektivem Aktivkohlefilter
- Drei mögliche Gürtelpositionen
- Transparent und beige
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

2 Beutelgrößen: Midi: 460 ml Volumen; Maxi: 600 ml Volumen

FARBE	GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● beige	Midi	~460 ml	45 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931045DE	04760110
● beige	Midi	~460 ml	55 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931055DE	04760133
● beige	Midi	~460 ml	65 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931065DE	04760162
○ transparent	Maxi	~600 ml	45 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931545DE	04760239
○ transparent	Maxi	~600 ml	55 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931555DE	04760251
○ transparent	Maxi	~600 ml	65 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931565DE	04760274
○ transparent	Maxi	~600 ml	80 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931580DE	04763195
● beige	Maxi	~600 ml	45 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931445DE	04763226
● beige	Maxi	~600 ml	55 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931455DE	04763232
● beige	Maxi	~600 ml	65 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931465DE	04763249
● beige	Maxi	~600 ml	80 mm	29.26.01.0074	30 Stück	931480DE	04763255



Softima® 3S Roll'Up Ileostomiebeutel

Moderner Ausstreif-Ileostomiebeutel für das flexible, 2-teilige Rastring-System Softima® 3S „Simpel. Sicher. Soft.“, inkl. 6 Klebestreifen

- Blickdichtes, weiches Vlies
- Raschelarme Folie
- Flüssigkeitsfester Filter mit hohem Luftdurchlass und effektivem Aktivkohlefilter
- Drei mögliche Gürtelpositionen
- Transparent und beige
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

2 Beutelgrößen: Midi: 460 ml Volumen; Maxi: 600 ml Volumen


FARBE	GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	Midi	~460 ml	45 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932145DE	04763278
○ transparent	Midi	~460 ml	55 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932155DE	04763290
○ transparent	Midi	~460 ml	65 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932165DE	04763309
● beige	Midi	~460 ml	45 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932045DE	04763321
● beige	Midi	~460 ml	55 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932055DE	04763344
● beige	Midi	~460 ml	65 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932065DE	04763350
○ transparent	Maxi	~600 ml	45 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932545DE	04808093
○ transparent	Maxi	~600 ml	55 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932555DE	04808101
○ transparent	Maxi	~600 ml	65 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932565DE	04808118
○ transparent	Maxi	~600 ml	80 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932580DE	04808124
● beige	Maxi	~600 ml	45 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932445DE	04809359
● beige	Maxi	~600 ml	55 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932455DE	04810339
● beige	Maxi	~600 ml	65 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932465DE	04810434
● beige	Maxi	~600 ml	80 mm	29.26.02.0091	30 Stück	932480DE	04811238

ZWEITEILIGE VERSORGUNG






Softima® 3S Uro

Moderner Urostomiebeutel für das flexible, 2-teilige Rastring-System
Softima® 3S „Simpel. Sicher. Soft.“

- Blickdichtes, weiches Vlies
- Raschelarme Folie
- Integrierte Rücklaufsperrung zum Schutz der Haut vor Urin
- Easy Outlet-Auslasssystem zur einfachen Entleerung des Beutels
- Inklusive Universaladapter zum Anschluss von Nacht- oder Beinbeuteln, die Adapter liegen in gleicher Anzahl wie die Beutel bei
- Transparent und beige
- Beige Varianten mit Sichtfenster zur optischen Kontrolle der Ausscheidung 
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei


Beutelgröße: 650–720 ml

FARBE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	~650 ml	45 mm	29.26.03.0052	30 Stück	934145DE	04813504
○ transparent	~650 ml	55 mm	29.26.03.0052	30 Stück	934155DE	04813697
○ transparent	~650 ml	65 mm	29.26.03.0052	30 Stück	934165DE	04814225
● beige 	~720 ml	45 mm	29.26.03.0052	30 Stück	934045DE	04817117
● beige 	~700 ml	55 mm	29.26.03.0052	30 Stück	934055DE	04819151
● beige 	~650 ml	65 mm	29.26.03.0052	30 Stück	934065DE	04821544






Softima® 3S High Flow


Moderner, großvolumiger Ileostomiebeutel für das flexible, 2-teilige Rastring-System Softima® 3S „Simpel. Sicher. Soft.“

- Ergonomische Beutelform
- Weiches Vlies
- Beige Varianten mit Sichtfenster zur optischen Kontrolle der Ausscheidung 
- Flüssigkeitsfester Filter
- Easy Outlet-Auslasssystem mit Anschlussmöglichkeit für einen zusätzlichen Auffangbeutel (Flow Collector Art.-Nr.: 39900)
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Beutelgröße: 600–970 ml

FARBE	GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	Maxi	~600 ml	55 mm	29.26.12.0004	30 Stück	933155DE	04812663
○ transparent	Maxi	~600 ml	65 mm	29.26.12.0004	30 Stück	933165DE	04813013
○ transparent	Maxi	~600 ml	80 mm	29.26.12.0004	30 Stück	933180DE	04813036
● beige 	Maxi	~970 ml	55 mm	29.26.12.0004	30 Stück	933055DE	04813094
● beige 	Maxi	~940 ml	65 mm	29.26.12.0004	30 Stück	933065DE	04813102
● beige 	Maxi	~900 ml	80 mm	29.26.12.0004	30 Stück	933080DE	04813438



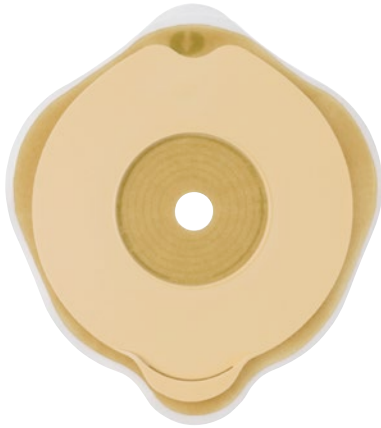

ZWEITEILIGE VERSORGUNG



Softima® Key Basis plan

Haftring Basisplatte plan

- Basisplatte mit komplettem Hautschutz
- Patentiertes Key System zum einfachen Positionieren des Beutels
- Flexibler Haftring Zweiteiler
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei




RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
40 mm	 15–30 mm	29.26.05.0102	10 Stück	63040	00993343
50 mm	 15–40 mm	29.26.05.0102	10 Stück	63050	00993366
60 mm	 15–50 mm	29.26.05.0102	10 Stück	63060	00993372
80 mm	 15–75 mm	29.26.05.1052	10 Stück	63080	00993389



Softima® Key Basis konvex

Konvexe Basisplatte für das 2-teilige Softima® Key Haftring System

- Optimale Anpassung an die Haut
- Weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Schonende Druckverteilung
- Konvexität = 4 mm
- Einfacher Beutelwechsel dank des Softima® Key Systems
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
50 mm	 15–25 mm	29.26.06.0048	5 Stück	63052	00028470
60 mm	 15–35 mm	29.26.06.0048	5 Stück	63062	00028553
60 mm	 15–45 mm	29.26.06.0048	5 Stück	63063	00028607
60 mm	25 mm	29.26.06.0048	5 Stück	63064	00031265
60 mm	30 mm	29.26.06.0048	5 Stück	63066	00050475
60 mm	35 mm	29.26.06.0048	5 Stück	63067	00050498
60 mm	40 mm	29.26.06.0048	5 Stück	63069	00773305

ZWEITEILIGE VERSORGUNG



Softima® Key Kolo

Haftring-Kolostomiebeutel mit integriertem Filter

- Ergonomisch geformter Kolostomiebeutel in transparent und beige
- Softima® Key Haftring
- Integrierter Lamina Technologie-EntlüftungsfILTER
- Inkl. 30 Klebestreifen
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Beutelgrößen: 420 ml bis 550 ml, abhängig von der Ringgröße

FARBE	RINGGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	40 mm	29.26.01.0045	30 Stück	63240	00993260
○ transparent	50 mm	29.26.01.0045	30 Stück	63250	00993277
○ transparent	60 mm	29.26.01.0045	30 Stück	63260	00993283
○ transparent	80 mm	29.26.01.0045	30 Stück	63280	00993308
● beige	40 mm	29.26.01.0045	30 Stück	63140	00993395
● beige	50 mm	29.26.01.0045	30 Stück	63150	00993403
● beige	60 mm	29.26.01.0045	30 Stück	63160	00993432
● beige	80 mm	29.26.01.0045	30 Stück	63180	00993449



Softima® Key Ileo Roll'Up

Ergonomisch geformter Ausstreifbeutel mit Roll'Up Auslass

- Formstabile Hautschutzfläche aus leistungsstarken Haftkomponenten
- Sicherer und fester Sitz des Beutels auf der Basisplatte
- Key-Konzept (Führungshilfe) ermöglicht ein druckfreies und schmerzarmes Aufbringen der Versorgungsbeutel auf die Basisplatte
- Ergonomisch geformt
- Effektiver Entlüftungsfilter
- Weiche Vliesumhüllung und geräuscharme, geruchsdichte Beutelfolie
- Moderner Roll'Up Verschluss für einfaches Handling
- Inkl. 6 Klebestreifen
- Beutel sitzt sehr flach auf der Platte auf und ist dadurch sehr diskret
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

3 Beutelgrößen: 250 ml bei Ringgröße 40 mm

550 ml bei Ringgröße 50 mm

610 ml bis 670 ml, abhängig von der Ringgröße 60 oder 80 mm

FARBE	RINGGRÖSSE	VOLUMEN	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	40 mm	~250 ml	29.26.02.0078	30 Stück	631240	00088503
○ transparent	50 mm	~550 ml	29.26.02.0078	30 Stück	631250	00093409
○ transparent	60 mm	~610 ml	29.26.02.0078	30 Stück	631260	00107287
○ transparent	80 mm	~670 ml	29.26.02.0078	30 Stück	631280	00117535
● beige	40 mm	~250 ml	29.26.02.0078	30 Stück	631241	00093384
● beige	50 mm	~550 ml	29.26.02.0078	30 Stück	631251	00107264
● beige	60 mm	~610 ml	29.26.02.0078	30 Stück	631261	00115312
● beige	80 mm	~670 ml	29.26.02.0078	30 Stück	631281	00117558

ZWEITEILIGE VERSORGUNG



Softima® Key Ileo Drainage

Ergonomisch geformter Ileostomie-Drainage-Beutel mit integriertem LKP-EntlüftungsfILTER, weicher Vliesumhüllung, Aussparung zur optischen Kontrolle der Ausscheidungen und Easy Outlet-Auslasssystem mit Anschlussmöglichkeit für einen zusätzlichen Auffangbeutel

- LKP-EntlüftungsfILTER
- Aussparung zur optischen Ausscheidungskontrolle
- Anschlussmöglichkeit für den Flow Collector
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Beutelgröße: 600 ml

FARBE	RINGGRÖSSE	VOLUMEN	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ transparent	80 mm	~600 ml	29.26.02.2178	30 Stück	63680	00993254
● beige	50 mm	~600 ml	29.26.02.2178	30 Stück	63550	00993202
● beige	60 mm	~600 ml	29.26.02.2178	30 Stück	63560	00993219

High Output

VERSORGUNG VON ILEOSTOMIEANLAGEN MIT ERHÖHTEN AUSSCHIEDUNGSMENGEN



Zur Versorgung von Ileostomieanlagen, die durch sehr flüssige und aggressive Ausscheidungen in großen Mengen (> 2 Liter pro Tag) charakterisiert sind, stehen Ihnen die 2-teiligen Systeme Softima® 3S und Softima® Key zur Wahl. Die Produktsysteme sind besonders zur Versorgung von Jejunostomien sowie für den Einsatz bei Patienten, die nach Chemotherapien unter erhöhtem Flüssigkeitsverlust leiden, geeignet.






EASY OUTLET-AUSLASSSYSTEM DES STOMA-BEUTELS

- Großer Auslass mit Verschlusskappe
- Sichtfenster zur optischen Kontrolle der Ausscheidungen
- Kann mit zusätzlichem Auffangbeutel Flow Collector verbunden werden (z. B. für die Versorgung in der Nacht)

FLOW COLLECTOR – AUFFANGBEUTEL

Der Flow Collector sorgt im Einsatz mit Drainagesystemen für eine erhebliche Reduzierung des Pflegeaufwands und schafft eine komfortable und angenehme Versorgungssituation für Patienten und Pflegekräfte. Zusätzlich ist eine Bilanzierung des Outputs mit Hilfe des Flow Collectors möglich.

- 1,5 m langes Schlauchsystem, individuell zuschneidbar
- Blickdichte Materialien für eine diskrete Versorgung
- Auslass zum einfachen Entleeren des Beutels
- 2000 ml Beutelvolumen

	Softima® 3S High Flow	Seite 31
	Softima® 3S Basisplatten	Seite 26–27
	Softima® Key Ileo Drainage	Seite 36
	Softima® Key Basisplatten	Seite 32–33
	Flow Collector	Seite 57



IRRIGATION

Die Irrigation (Ausspülen) des Darms ermöglicht Kolostomieträgern die Kontrolle der Stuhlentleerung zurückzugewinnen. Die moderne Versorgung der Kolostomie mit einer Irrigation ermöglicht eine entleerungsfreie Zeit bis zu 48 Stunden. In dieser Zeit benötigt der Stomaträger nur noch eine kleine Kappe anstelle der normalen Stomabeutel.

IryPump® S

TIME MACHINE – 48 STUNDEN FREIHEIT ... IMMER UND IMMER WIEDER



Shoppen, Verreisen, Sport – was immer Sie vorhaben, mit IryPump® S, der innovativen elektronischen Pumpe zur Stoma-Irrigation, können Sie Ihr Leben wieder genießen.

Ihre Vorteile mit IryPump® S:

Die Irrigation mit IryPump® S gibt Ihnen die lang ersehnte Unabhängigkeit und Freiheit wieder:

- Stuhlgang zum selbstbestimmten Zeitpunkt
- Deutliche Reduzierung der gasbildenden Bakterien im Darm (unerwünschte Blähungen)
- Diskrete Versorgung mit Minibeuteln während der entleerungsfreien Zeit
- Bis zu 48 Stunden entleerungsfreie Zeit, in denen Sie endlich tun und lassen können, was Sie möchten. Immer und immer wieder.

Vorteilhafte Eigenschaften der IryPump® S

Die neue Generation elektronischer Irrigationssysteme:

- Innovatives, kompaktes Design
- Einfache, bequeme Bedienung
- Individuell einstellbarer und gleichmäßiger Wasserfluss
- Einfaches Handling für jedermann
- Stabiler Stand – kann überall aufgestellt und eingesetzt werden
- Komfortable, einfache und sichere Irrigation dank elektronischer Pumpensteuerung
- Hochleistungsakku für den Gebrauch überall und jederzeit

Entdecken Sie die Vorteile des IryPump® Irrigationssystems.

Jetzt als App kostenlos im App Store erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.bbraun.de/de/patienten/stoma/irypump.html



Entdecken Sie die Vorteile des IryPump® Irrigationssystems. Jetzt als kostenlose App für Ihr iPad im AppStore erhältlich.

IRRIGATION



IryPump® S Set

Moderne, kompakte, sichere und einfache Irrigation bei Kolostomie

- Lange Akku-Laufzeit
- Wasserdichtes Gerätegehäuse nach IP 24
- Magnet-Netzanschluss
- Stufenlos regelbarer Wasserfluss
- Abnehmbarer Wassercontainer – einfach zu reinigen und zu trocknen
- Verfärbungssicherer Schlauch
- Weicher, anatomischer Konus
- Temperaturkontrolle
- Ladekontrolle
- Einfaches Handling (Quick-Konnektoren): Kein Verwechseln der Schlauchanschlüsse mehr möglich

Komplettes Starter-Set inkl.

IryPump® S (Irrigationpumpe, Wasserbehälter und Netzadapter), IryCone®+ (Konus mit Schlauchsystem), IrySleeve® Irrigationsschlauchbeutel 60 mm, Iryflex® Basisplatte, B. Braun Stoma Care Belt, Softima® Active Mini Kolostomie Beutel

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
IryPump® S Set	29.26.08.1006	1 Set	29120DE	09688653



IryPump® Wasserbehälter

Ersatz-Wasserbehälter zur IryPump® S

- Genaue Mengenanzeige
- Temperatur-Indikator
- Ausziehbar
- Füllmenge: bis zu 1,5 L

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
IryPump® Wasserbehälter	29.26.11.6999	1 Stück	29240	09688699



IryPump® Power Supply

Ersatz-Ladegerät zur IryPump® S

- Netzadapter zum Laden der IryPump® S
inkl. USB Anschluss für die Lademöglichkeit mittels PC oder Powerbank

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
IryPump® Power Supply	29.26.11.6999	1 Stück	33220922	14027391



IryCone+

Weicher Irrigationskonus mit passendem Schlauchsystem für die IryPump® S

- Weicher Konus
- Schlauchsystem mit einfachem „Klick“-Anschluss
- Ausschließlich für die Nutzung mit der IryPump® S
- Durchmesser Konus: 60 mm
- Schlauchlänge: 130 cm
- Latex-frei, PVC-frei

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
IryCone+ Konus mit Schlauchsystem	29.26.11.6999	1 Stück	29220DE	09688742

IRRIGATION

IryPump® Tragetasche

Tasche für den Transport der IryPump® S und Zubehör



- Eignet sich ideal für den Transport der IryPump® S
- Bietet zusätzlichen Platz für Zubehör wie IryCone+, IryPump® Netzadapter, Mini-Stomabeutel etc.
- Besitzt rechts und links zwei Seitenfächer, die jeweils mit einem Reißverschluss verschlossen werden können
- Ideal für Reisen geeignet
- Diskret und modern durch klassisches Design und dezente Farbe

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
IryPump® Tragetasche	-	1 Stück	29230	14186511

Iryflex® Set

Schwerkraft-Irrigationsset zur Irrigation bei Kolostomie-Trägern



- Leichtes Befüllen des verschließbaren Wasserbehälters
- Einfaches Aufhängen durch große Halteöse
- Leicht zu bedienender Flussregler
- Kontrolliertes Einlaufen des Wassers dank Flusskontrolle
- Gut lesbare Temperaturanzeige
- Integrierte Rollenklemme zum einfachen Öffnen und Verschließen des Schlauches
- Komplettes Set zum sofortigen Starten
- Set-Inhalt:
Iryflex® Wasserbehälter, Spülkonus, IrySleeve® Irrigationsschlauchbeutel, Trägerplatte, Gürtel, Tasche, Softima® Active Mini Kolostomie Beutel beige, Iryfix® Stomakappe

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Iryflex® Set	29.26.08.0021	1 Stück	60651DE	02298498



Iryflex® Wasserbehälter

Wasserbehälter für Iryflex® Schwerkraft-Irrigationsset

- Großer Einfüllstutzen
- Gut lesbare Temperaturanzeige
- Integrierte Rollenklemme zum einfachen Öffnen und Verschließen des Schlauches
- Füllmenge: Bis zu 1,5 L
- Durchflussregler
- Farbige Füllstandsanzeige

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Iryflex® Wasserbehälter	-	1 Stück	60600DE	03383591



Iryflex® Sicherheitskonus

Einzelner Spülkonus für Iryflex®-Schwerkraft-Irrigationsset

- Ersatzkonus für das IryFlex® Irrigationsset
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei
- Nicht anzuwenden bei: Prolabiertem Stoma, parastomaler Hernie, anatomischen Anomalien des Dickdarms, entzündlichen Darmerkrankungen, Stenose des Stomas, Strahlen- und Chemotherapie, schlechtem Allgemeinzustand, Herzerkrankungen

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Iryflex® Sicherheitskonus	-	1 Stück	F05062DE	02298512

IRRIGATION



Iryflex® Basisplatte

Basisplatte mit Gürtelösen zum Aufbringen von Irrigationsschlauchbeuteln, 3 Gürtelösen pro Seite für mehr Tragekomfort

- Basisplatte zur Nutzung bei der Stoma-Irrigation
- Passend zu den IrySleeve® Irrigationsschlauchbeuteln
- Weicher Andruckring zur Schonung der Haut
- 3 Gürtelpositionen für optimalen Tragekomfort
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Iryflex® Basisplatte	29.26.11.6999	1 Stück	F05064DE	03383616



IrySleeve® Irrigationsschlauchbeutel

Irrigationsschlauchbeutel zur Nutzung während der Irrigation mit integrierter Verschlussklammer

- Hautfreundliche Haftfläche
- Nutzung mit Softima® Key Basisplatte, Irrigationsbasisplatte oder direkt auf der Haut

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Irrigationsschlauchbeutel 60 mm	29.26.08.2015	30 Stück	60630DE	09432132



Iryfix® Stomaverschlusskappe

Stomaverschlusskappe mit weichem Aktivkohle-Filterzapfen

- Flache, unauffällige Stomakappe
- Für Stomagröße bis 35 mm
- Beigefarbenes Vlies
- Integrierter Aktivkohlefilter
- Hautfreundliches Haftvlies
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

FARBE	GRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● beige	für Stoma-Ø bis 35 mm	29.26.11.5004	15 Stück	F00014DE	03018265

IRRIGATION



Softima® Active Mini Kolostomie Beutel

Der kleinste Kolostomiebeutel der Softima® Active Produktreihe zur Versorgung während der entleerungsfreien Zeit und besonders auch zur Versorgung von Kindern – gerade hier muss die Basisplatte sicher halten und ein hohes Maß an Flexibilität haben

- Weite: 125 mm
- Länge: 150 mm
- Patentierte Basisplatte mit B. Braun Tech Hautschutz: Neuartige hydrokolloide Formel für einen hohen Tragekomfort und wenig Rückstände auf der Haut
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei
- Mit Sichtfenster

Beutelgröße: 220 ml

FARBE	GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● beige	● Mini	~220 ml	🌐 15–45 mm	29.26.01.2125	30 Stück	4610215DE	09061747



Softima® Kolo Mini

Der kleinste Kolostomiebeutel der Softima® Produktreihe zur Versorgung von Kolostomien, vor allem bei der Irrigation und während der entleerungsfreien Zeit; auch zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen geeignet

- Minibeutel mit 220 ml Volumen (+/- 30 ml)
- Beutelabmessung: 150 x 125 mm
- Basisplattengröße: 80 x 86 mm
- Bewährte Softima® Basisplatte im Flower Shape-Design
- Geruchsdichte, raschelarme Folie mit hautfreundlichem Vlies und integriertem Aktivkohlefilter
- In beige erhältlich
- Plane Basisplatte
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Beutelgröße: 220 ml (+/-30 ml)

FARBE	GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
● beige	Mini	~220 ml	🌐 15–45 mm	29.26.04.1073	30 Stück	43212DE	00716773
● beige	Mini	~220 ml	20 mm	29.26.04.1073	30 Stück	43220DE	00716968
● beige	Mini	~220 ml	25 mm	29.26.04.1073	30 Stück	43225DE	00716974
● beige	Mini	~220 ml	30 mm	29.26.04.1073	30 Stück	43230DE	00716980
● beige	Mini	~220 ml	35 mm	29.26.04.1073	30 Stück	43235DE	00717040



HAUTSCHUTZ

Durch den regelmäßigen Plattenwechsel und die austretenden Ausscheidungen wird die parastomale Haut immer wieder stark beansprucht. Die Hautschutzprodukte von B. Braun helfen der Haut sich zu erholen und beugen Schädigungen vor. Die Produkte der Askina® Barrier Reihe helfen dabei, Hautschädigungen vorzubeugen und sind dabei schnell und effektiv in der Anwendung.

HAUTSCHUTZ




Askina® Barrier Film

Schnell trocknender, atmungsaktiver Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung

- Transparent und alkoholfrei
- Trocknet in nur 30 Sekunden
- Effektiver Hautschutz vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibung
- Hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten
- Sauerstoff- und feuchtigkeitsschleppend
- Wirksam bis zu 72 Stunden
- Indikationen: Vorbeugung gegen Hautschädigung durch Reibung oder Feuchtigkeit, Schutz der Haut vor Mazeration

PRODUKT	INHALT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Pumpspray	28 ml	29.26.10.2023	1 Stück	4002801	06905222

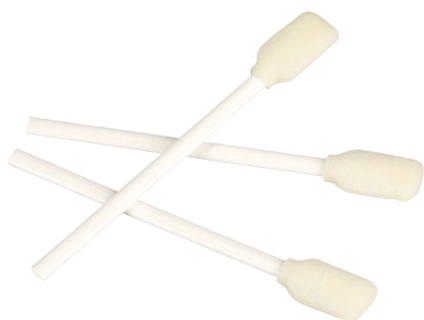

Askina® Barrier Swabs

Schnell trocknender, atmungsaktiver Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung in Lolly-Form

- Transparent und alkoholfrei
- Trocknet in nur 30 Sekunden
- Effektiver Hautschutz vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibung
- Hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten
- Sauerstoff- und feuchtigkeitsschleppend
- Wirksam bis zu 72 Stunden
- Indikationen: Vorbeugung gegen Hautschädigungen durch Reibung oder Feuchtigkeit, Schutz der Haut vor Mazeration

PRODUKT	INHALT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Applikator	1 ml	29.26.10.2022	5 Stück	4000105	06905162
Applikator	1 ml	29.26.10.2022	25 Stück	4000125	06905179

HAUTSCHUTZ



Askina® Barrier Cream

Nicht rückfettende Hautschutzcreme, wirkt bis zu 72 Stunden – auch unter Haftverbänden oder Stomaversorgungen anwendbar

- Bildet einen atmungsaktiven, transparenten Schutzfilm
- Schützt intakte und gereizte Haut bis zu 72 Stunden vor Ausscheidungen und Wundsekreten
- Spendet Feuchtigkeit
- Äußerst sparsam im Verbrauch
- Brennt nicht auf der Haut

PRODUKT	INHALT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Tube	92 gr	–	1 Stück	4119201	10417540



Askina® Vliesstoffkompressen

Vliesstoffkompressen

- Für alle Arten der klassischen Wundversorgung, als Salben- oder Medikamententräger
- 4-fach gelegt

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.

Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke

PRODUKT	ABMESSUNG	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Kompresse 4-fach	10 x 10 cm	–	100 Stück	9034706	10041023
Kompresse 4-fach	10 x 10 cm	–	200 Stück	9034714	10041052
Kompresse 4-fach	5 x 5 cm	–	100 Stück	9034722	10041075
Kompresse 4-fach	7,5 x 7,5 cm	–	100 Stück	9034730	10041098
Kompresse 4-fach	10 x 20 cm	–	100 Stück	9034749	10041112



B. Braun Adhesive Remover (Pflasterentferner)

Der B. Braun Pflasterentferner unterstützt bei der schnellen und Traumata-freien Entfernung von medizinischen Klebstoffen auf der Hautoberfläche, die bei Produkten der Stomaversorgung, Verbänden und anderen medizinischen Produkten enthalten sind.

- Auf Silikonbasis
- Enthält keine Alkohole oder Öle
- Hinterlässt keine Rückstände nach der Anwendung
- Sanft auf der Haut
- Geruchsneutral
- Enthält kein FCKW
- Als Sprühflasche verfügbar
- Inhalt: 50 ml

PRODUKT	INHALT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Pumpspray	50 ml	-	1 Stück	AR5001	14030401



Superfiller

Spezielle hydrokolloide Paste zum Auffüllen und Ausgleichen von Hautunebenheiten

Stomapaste immer zuerst auf die Platte geben; nach ca 30–60 Sekunden ist der oberflächliche Alkohol verdampft, und die Platte kann mit der Paste auf die Haut aufgesetzt werden

PRODUKT	INHALT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Tube	60 g	29.26.10.0004	1 Stück	22214	04902840



ZUBEHÖR

Produkte für die Bindung von flüssigen Ausscheidungen (Ileo® Gel+) oder für die Sicherheit (B. Braun Stoma-Gürtel) runden das Produktangebot von B. Braun ab.

ZUBEHÖR



Ileo® Gel+

Selbstaflösende Pulver-Sachets zur Bindung von flüssigen Ausscheidungen

- Optimierter Tragekomfort
- Steigerung der Filtereffektivität
- Unterstützt die hygienische Entleerung
- Patentiertes Konzept

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Ileo® Gel+	-	45 Stück	5012	02954821


ZUBEHÖR



B. Braun Stoma-Gürtel

Zur sicheren Fixierung aller konvexen B. Braun Systeme sowie der IryFlex® Basisplatte und der Softima® 3S Beutel

PRODUKT	GRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Stomagürtel weiß	60–110 cm ungedehnt	29.26.11.0021	1 Stück	5028DE	00433331

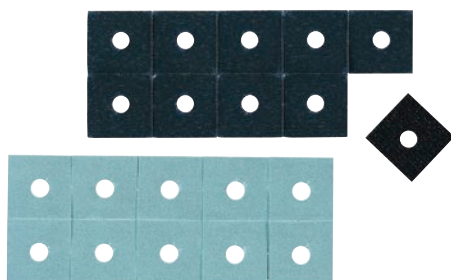

Biotrol® Entlüftungsfiler

Nachträglich/zusätzlich aufzuklebender Filter, kann mit allen Beuteltypen kombiniert werden

- Erhöht die Filterkapazität bei integriertem Filter und erhöhter Darmgasbildung
- Einfach am oberen Rand des Beutels anzubringen
- Nicht bei Vlies umhüllten Beuteln anzuwenden
- Ausscheidungsbeutel muss an der vorgesehenen Position des Filters mit einer Nadel eröffnet werden

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Biotrol® Entlüftungsfiler	29.26.11.1002	50 Stück	22501	02347446



Extrufix® Entsorgungsbeutel

Grauer, blickdichter Abfallbeutel

- Aus Polyethylen
- Auf Endlosrolle
- Weitgehend blickdicht – je nach Wanddicke
- In 6, 15 oder 30 Litern Fassungsvermögen und unterschiedlichen Wanddicken

VOLUMEN	GRÖSSE	MATERIALSTÄRKE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
6 L	30 x 36 cm	23 µm	–	48 Stk./Rolle	6201067	01868479
15 L	37 x 50 cm	23 µm	–	48 Stk./Rolle	6201156	01868485
30 L	50 x 65 cm	27 µm	–	24 Stk./Rolle	6201300	01868491



Stoma Entsorgungsbeutel

Blauer, blickdichter Abfallbeutel

- Aus Polyethylen (mit geringerer Dichte)
- Softes Material
- Geringe Geräusentwicklung
- Diskrete Entsorgungsmöglichkeit
- Verpackungseinheit: 100 Stück (jeweils zu 25 Stück gebündelt)
- Fassungsvermögen: 4 Liter

VOLUMEN	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
4 L	–	100 Stück	F00750A	15391549

ZUBEHÖR



Verschlussklammer
Ersatzverschlussklammer für Ausstreifbeutel

PRODUKT	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
Verschlussklammer	-	10 Stück	22745	03516046



Medicare® Bettbeutel
Mit Rückflusssperre und Ablassventil

- Antirefluxventil
- Ablasshahn
- Fassungsvermögen: 2 Liter
- Schlauchlänge: in 90 cm oder 120 cm verfügbar
- Steril und unsteril verfügbar
- Latex-frei

VARIANTE	VOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
unsteril	~2000 ml	90 cm	15.25.06.1004	10 Stück	28114	00728658
unsteril	~2000 ml	120 cm	15.25.06.1004	10 Stück	28216	00853263
einzel steril verpackt	~2000 ml	90 cm	15.25.06.3000	10 Stück	28115	00732223



Urimed® Tribag Plus 500/800 ml

Dreikammer-Urinbeutel in 500 ml oder 800 ml, in unsteril

- Dreikammer-Urinbeutel, für einen verbesserten Tragekomfort
- Rücklaufsperr
- Sicherheitsventil
- Weiche Vliesrückseite
- Unsterile Varianten auf gewünschtes Maß kürzbar
- Latex-frei

PRODUKT	SCHLAUHLÄNGE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
~500 ml, unsteril	60 cm	15.25.05.1086	10 Stück	28206	05015940
~800 ml, unsteril	60 cm	15.25.05.1086	10 Stück	28306	05016017



Flow Collector

Auffangbeutel für die Produkte Softima® Key Ileo Drainage und Softima® 3S High Flow

- Blickdichter Auffangbeutel für die komfortable Tag- und Nachtversorgung mit 2000 ml Beutelvolumen
- Optimale Beutelform: diese erleichtert das Anhängen des Flow Collectors ans Bett, ohne dass der Auslass auf dem Boden aufliegt
- 1,5 m langer, individuell kürzbarer Schlauch
- Der Flow Collector reduziert den Pflegeaufwand erheblich und schafft für Patienten und Pflegekräfte eine komfortable und angenehme Versorgungssituation
- Senkrecht nach unten gerichteter Auslass, mit leicht zu öffnendem Verschluss
- Ermöglicht eine komfortable Tag- und Nachtversorgung von Ileostomieanlagen mit erhöhten Ausscheidungsmengen
- Latex-frei


FARBE	VOLUMEN	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
○ weiß, blickdicht	~2000 ml	29.26.11.6109	15 Stück	39900	06090636

Ernährungsratgeber für Stomaträger

ALS BUCH UND EBOOK ERHÄLTlich



DER BEI PATIENTEN UND IN FACHKREISEN GESCHÄTZTE RATGEBER „STOMA UND ERNÄHRUNG“ MIT REZEPTIDEEN VON ALFONS SCHUHBECK IST SOWOHL ALS BUCH ALS AUCH ALS AMAZON KINDLE-VERSION ERHÄLTlich.

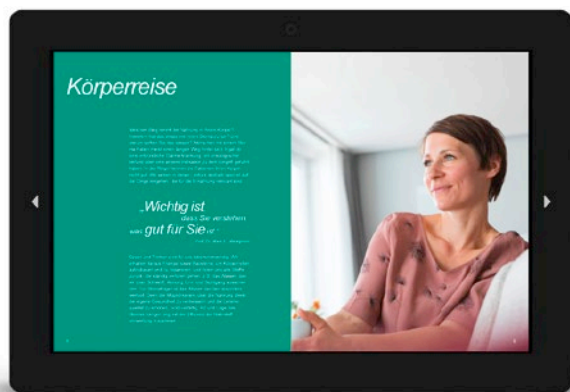

Die Autoren, Anästhesist und Intensivmediziner Privatdozent Dr. Michael Adolph, Chirurg Prof. Dr. Marc E. Martignoni und Sternekoch Alfons Schuhbeck, sprechen in diesem Ratgeber über Ernährung, die speziell auf die Bedürfnisse von Stomaträgern abgestimmt ist.

Der Ratgeber nimmt den Leser mit auf eine Körperreise, erklärt, was beim Verdauen von Nahrung passiert, liefert eine kleine Nährstoffkunde und gibt Tipps bei Blähungen, Verstopfung und gut bzw. schwer verdaulichen Lebensmitteln.

Besondere Rezepte von Starkoch Alfons Schuhbeck aus München machen den Ratgeber zu einem täglichen Begleiter in der Küche eines Menschen mit künstlichem Darmausgang.

Zu bestellen ist der Ratgeber für 4,99 Euro über Amazon unter: www.amazon.de/dp/B07FNSXP16/




Weitere Infos unter www.bbraun.de/stoma-ratgeber

Erhältlich bei
amazon

Das eBook ist für Smartphones und Tablets über die Android und iOS Kindle-App sowie für alle gängigen Kindle Fire Tablets verfügbar.

Eine Lösung für jeden Fall

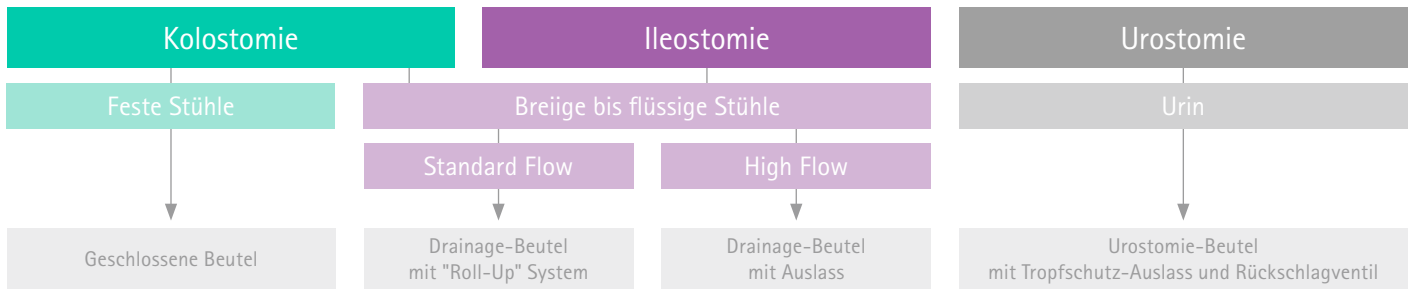

EINTEILIGE SYSTEME – Softima®

Softima® Closed



Softima® Roll'Up



Softima® Active Closed



Softima® Active Roll'Up




EINTEILIGE SYSTEME – Softima®

Softima® Uro Silk



ZWEITEILIGE KLICK-SYSTEME – Softima® 3S


Softima® 3S Closed

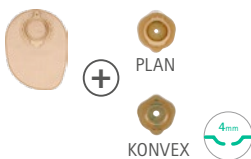

Softima® 3S Roll'Up



Softima® 3S High Flow

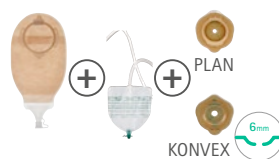


Softima® Be 1®




ZWEITEILIGE KLICK-SYSTEME – Softima® 3S Uro

Softima® 3S Uro

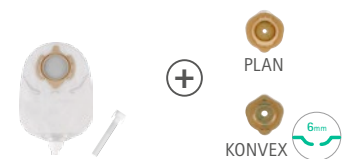

ZWEITEILIGE KLEBE-SYSTEME – Softima® Key


Softima® Key Closed

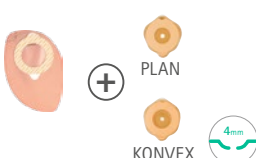

Softima® Key Roll'Up



Softima® Key Maxi

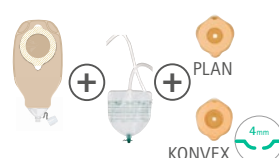

⊕ URIN-AUFFANGBEUTEL



BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET:

www.bbraun.de/stoma-patienten

Unter dieser Adresse steht umfangreiches Fachwissen zur Verfügung:
Hintergrundinformationen, Hilfsmittelkonzepte, rechtliche Grundlagen,
Wissenswertes über das Leben mit Stoma u.v.m.